

Bedienungsanleitung

1. Schließen Sie den 1/4 Melker mit Hilfe der beiden Schläuche wie folgt an (Abb. 1):
 - a den Schlauch mit dem Anschlussstück mit dem betreffenden Zitzengummi verbinden
 - b den Schlauch ohne Anschlussstück am Milchsammelstück befestigen.
2. Achten Sie darauf, dass die Schläuche richtig am Deckel befestigt sind (Abb. 2).
 - a Der Schlauch ohne Anschlussstück wird an das Ansatzstück des Kugelventils aufgesteckt. Sollte sich das Ventil bei diesem Vorgang schließen, so öffnen Sie es durch Zusammendrücken des Schlauchs.
 - b Den Schlauch mit dem Anschlussstück an der Einlauföffnung befestigen.
3. Nach dem Melkvorgang reinigen sie das Melkzeug wie gewohnt.
4. Reinigen Sie den 1/4 Melker durch Einfüllen von Wasser und herkömmlicher Reinigungsmittel. Schütteln Sie die Reinigungslösung kräftig in dem Sie den 1/4 Melker mit dem Deckel nach unten halten.
5. Lassen Sie die Reinigungslösung durch den Einlaufschlauch (mit Ansatzstütze) ablaufen, in dem Sie den Ventilschlauch nach oben halten.
6. Legen Sie den Deckel mit den montierten Schläuchen in eine Seifenlauge und reinigen Sie die Schläuche mit einer entsprechenden Bürste.
7. Desinfizieren Sie den 1/4 Melker nach mehreren Anwendungen und entfernen sie sämtliche Milchrückstände von allen Teilen.

Tipps zu Gebrauch

- Tragen Sie den 1/4 Melker mit dem dafür vorgesehen Griff und nicht mit den Schläuchen
- Entfernen sie die Schläuche nur so oft wie nötig (z.B. bei Desinfektionsreinigung) vom Deckel. Bei oftmaligem Entfernen der Schläuche verschlechtert sich deren Haftung an den Ansatzstückem am Deckel.

